



Estes componentes destinam-se a procedimentos especializados, que deve ser executado por profissionais devidamente habilitados, e apenas para o fim a que se destinam.

O produto não deve ser utilizado caso a embalagem esteja violada, ou que tenham as informações do rótulo ilegível.

Produto não estéril, este produto não deve ser esterilizado.

Produto de uso único. O reuso não garante a sua segurança e eficácia, e isenta qualquer garantia dos produtos relacionados.

DESCRIÇÃO

O componente análogo é um produto odontológico, com corpo cilíndrico, não implantável, de uso laboratorial.

COMPOSIÇÃO

O análogo é fabricado em aço inox.

INDICAÇÕES DE USO

O análogo é indicado para uso laboratorial, para reproduzir fielmente as dimensões e posicionamento do implante ou intermediário protético, por meio da moldagem de transferência, permitindo a confecção de prótese(s) sobre implante em modelos de gesso.

MODO DE USO

- Parafusar ou encaixar o análogo ao transferente de moldagem presente no molde.

- Vazar o gesso de modo que preencha o molde e cubra o análogo por inteiro.

- Aguardar a cura do gesso, o análogo presente no modelo irá replicar a plataforma e posição de componente intermediário ou implante.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Este produto é fornecido unitariamente, acondicionado em embalagem primária tipo blister e secundária em envelope de papel cartão, com rótulo adesivado no verso contendo informações para sua correta identificação.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizar sob a forma de calor úmido saturado (autoclave) à temperatura de 121°C (249,8 °F) durante 15 minutos ou ainda à temperatura de 132°C (269,6 °F) durante 3 minutos, de acordo com as recomendações da norma ISO 17665 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor.

CONTRA INDICAÇÕES

O produto não tem contraindicação quando utilizado de acordo com a finalidade e instruções de uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Os componentes devem ser armazenados em local limpo, seco, arejado e ao abrigo da luz do sol a uma temperatura ambiente em sua embalagem original.

DESCARTE DE MATERIAIS

Antes de descartar os produtos e materiais utilizados no procedimento de instalação dos componentes, o profissional deverá consultar e cumprir a legislação ou norma vigente.

PRAZO DE VALIDADE / LOTE

Este produto tem prazo de validade indeterminado. Data de fabricação e lote, vide rotulagem.

SIMBOLOGIA

Fabricante



Data de fabricação



Prazo de validade



Número do lote



Código do produto



Não estéril



Não reutilizar



Consultar instruções de uso



Manter seco



Manter ao abrigo do sol



Não utilizar se a embalagem estiver danificada